

AED Plus Trainer2

Pratique um salvamento com o AED Plus com controle total do instrutor



Uma simulação simples, bem controlada e precisa de como é usar um AED Plus® em um salvamento real.

ZOLL
Advancing Resuscitation. Today.®

O AED Plus Trainer2 inclui:

- AED de treinamento no AED Plus Trainer2
- Controle remoto sem fio
- Um conjunto de treinamento no AED Plus **CPR-D•padz**[®]
- Um conjunto de géis reutilizáveis do AED Plus Trainer **CPR-D•padz**
- 4 baterias de célula D
- 2 baterias de célula AA
- Guia do operador

ZOLL Medical Corporation -

Sede Mundial

269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011

ZOLL International Offices

Alemanha
+49 2236 87 87 0
www.zollmedical.de

Austrália
+61 2 8424 8700
www.zoll.com.au

Áustria
+43 650 413 6222
www.zollmedical.at

Canadá
905-629-5005
www.zoll.com

China
+86 21 6226 9505
www.zoll.com

França
+33 (1) 30 05 14 98
www.zoll.fr

Holanda
Representante autorizado na UE
+31 (0) 488 41 11 83
www.zoll.nl

Oriente Médio e África,
+96 278 800 4411
www.zoll.com

Reino Unido
+44 (0) 1928 595 160
www.zoll.com

Rússia
+7495 936 2338
www.zoll.com

Para obter os endereços e os números de fax das subsidiárias, bem como outros locais internacionais, acesse o site www.zoll.com/contacts.

Controle completo da simulação na ponta dos dedos do instrutor

O ZOLL[®] AED Plus Trainer2 permite que alunos de instrutores de RCP e primeiros socorros experimentem como é salvar uma vida com o AED Plus. Escolha a partir de quatro diferentes cenários de salvamento fixos ou tenha um controle manual completo do salvamento. Um controle remoto sem fio permite o controle de vários AED Plus Trainer2s.

Com esse simples controle remoto, os instrutores podem estabelecer um cenário de salvamento e inserir no AED Plus Trainer2 em segundos. O estudante só precisa apertar o botão on-off na unidade Trainer2 para começar. O instrutor determina então a ocorrência ou não de choque na simulação da análise cardíaca seguinte, fixação adequada ou não dos eletrodos e se a unidade de Trainer2 deve dizer "COMPRIMA MAIS FORTE" e "COMPRESSÕES BOAS".

Um simples botão de pausa permite que o instrutor interrompa o salvamento, converse com o estudante e então retome exatamente de onde parou.

Os protocolos estão em conformidade com os padrões do International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), incluindo as diretrizes American Heart Association (AHA) e European Resuscitation Council (ERC) 2005.

O Trainer 2 alterna facilmente das diretrizes AHA para ERC 2005



AED Plus Trainer2 Especificações

Dimensões: 5,25" H x 9,5" W x 11,5" D (13,3 cm H x 24,1 cm W x 29,2 cm D)

Peso: 2,2 kg (4 lb 14 oz)

Energia: 4 células D (incluídas) para o AED de treinamento (ideal para mais de 100 horas de treinamento)

2 células AA (incluídas) para o controle remoto

Adaptador AC não disponível-operado somente por bateria.



Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

©2007 ZOLL Medical Corporation. Todos os direitos reservados. "Advancing Resuscitation. Today."
AED Plus, **CPR-D•padz** e ZOLL são marcas registradas da ZOLL Medical Corporation.

Impresso nos E.U.A. 060802 9656-0202-24

ZOLL
Advancing Resuscitation. Today.[®]